

Einsenderanschrift*	
Firmenname:	
Ansprechpartner:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Fax:
E-Mail zur Befundübermittlung:	

**LADR Zentrallabor
Dr. Kramer & Kollegen**

T: 04152 803-333
F: 04152 803-425
www.biofocus.de/bestellen



Rechnungsanschrift* (sofern abweichend)

Firmenname:	
Straße:	
PLZ:	Ort:

Chargen-Nr. des Bioindikators:	
Entnahme-Datum:	Entnahme-Ort:
Probenehmer (in Druckbuchstaben):	

Heißluftsterilisator (HYHLSPK01)¹

Hersteller:	Geräte-Typ/Nr.:
Gerätevolumen:	Seriennummer:
Sterilisationszeit:	Temperatur:

Bemerkungen

¹ Angabe zur Laborerfassung

Anleitung der Probenentnahme zur Prüfung von Heißluftsterilisatoren

1 Bioindikatoren bestellen

Bioindikatoren (Prüfkörper) können Sie Online oder per Telefon bestellen:
LADR Biofocus Portal: www.biofocus.de/bestellen
E-Mail: kontakt@biofocus.de
T: 04152 803-333

2 Bestandteile des Probenahmesets:

- 1 x Auftragsschein LADR Auftragsschein – Prüfung Heißluftsterilisator
- 3 x oder 6 x Sporenpackchen für Heißluftsterilisator
- 1 x Transportkontrolle
- 1 x Rücksendekuvert

3 Einbringen der Sporenpackchen

Die 3 oder 6 Sporenpackchen in den Heißluftsterilisator legen. Auf eine gute Verteilung innerhalb des Gerätes ist zu achten. **Wichtig: Den Sporenstreifen nicht aus der blauen Umverpackung nehmen.**

4 Umgang mit der Transportkontrolle

Die Transportkontrolle ist mit „K“ zu kennzeichnen.

**Achtung! Die Transportkontrolle nicht im Heißluftsterilisator mitsterilisieren.
Diese bitte unbenutzt an das Labor zurückschicken.**

5 Ausfüllen des Auftragsschein

Für die korrekte Auswertung ist es erforderlich, dass alle Angaben auf dem Auftragsschein zur Prüfung des Heißluftsterilisators auf der Vorderseite vollständig ausgefüllt sind.

Achtung! Einsenderadresse auf dem Auftragsschein nicht vergessen.

6 Programm starten

Der Heißluftsterilisator sollte während der Überprüfung praxisgerecht beladen sein.

7 Sporenpackchen entnehmen

Die 3 oder 6 Sporenpackchen in den Druckverschlussbeutel überführen.

Achtung! Sterile Handschuhe oder sterile Pinzette nutzen.

8 Rückversand

Für die Rücksendung packen Sie die 3 oder 6 Sporenpackchen und die Transportkontrolle in das Rücksendekuvert. Senden Sie das Rücksendekuvert per Kurier oder Post an das

LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen.